

# LUNA<sup>®</sup> X5


KSZTAŁTUJEMY PRZYSZŁOŚĆ OPIEKI



ZESKANUJ, ABY  
UZYSKAĆ WIĘCEJ  
INFORMACJI!

## Szybki przewodnik

### PILOT

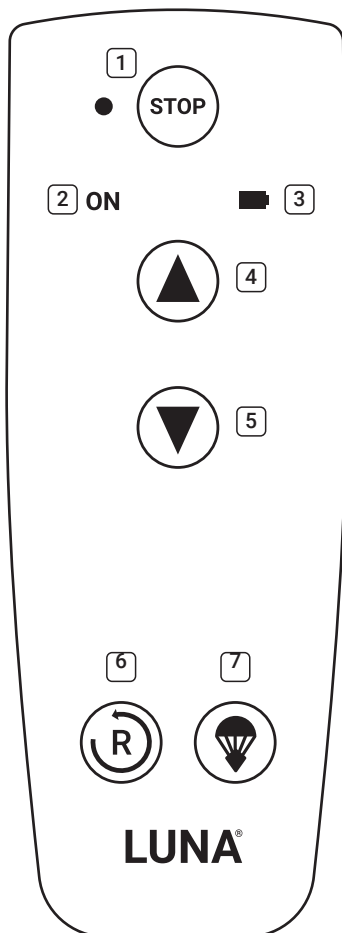

#### 1 AWARYJNE ZATRZYMANIE

Naciśnij, aby aktywować awaryjne zatrzymanie. Czerwona dioda oznacza aktywację. Przytrzymaj przycisk Reset (6), aby dezaktywować zatrzymanie awaryjne.

#### 2 WŁĄCZENIE ZASILANIA

Zielona dioda świeci, gdy podnośnik jest aktywny. Wszystkie diody wyłączają się po ok. 3 minutach bezczynności.

#### 3 BATERIA

- Zielony: 100%
- Pomarańczowy: 50%
- Czerwony: Wymaga ładowania

#### 4 GÓRA

#### 5 DÓŁ

#### 6 RESET

Przytrzymaj przez 5 sekund, aby wyłączyć awaryjne zatrzymanie. Dioda zgaśnie, a wszystkie przyciski zaczną działać ponownie.

#### 7 AWARYJNE OPUSZCZANIE

Jeśli funkcja Góra/Dół nie działa, przytrzymaj przycisk awaryjnego opuszczania – opuszczanie rozpocznie się po 5 sekundach. W trakcie opuszczania emitowany będzie ciągły sygnał dźwiękowy.


#### Ważne

Gdy nie jest używana, ładuj LUNA<sup>®</sup> X5 poprzez:

- Umieszczenie pilota w stacji ładowania.
- Podłączenie kabla ładowarki do panelu bocznego.

lub

Jeśli system szynowy jest wyposażony w ITC (ładowanie w szynie), ładowanie odbywa się automatycznie.

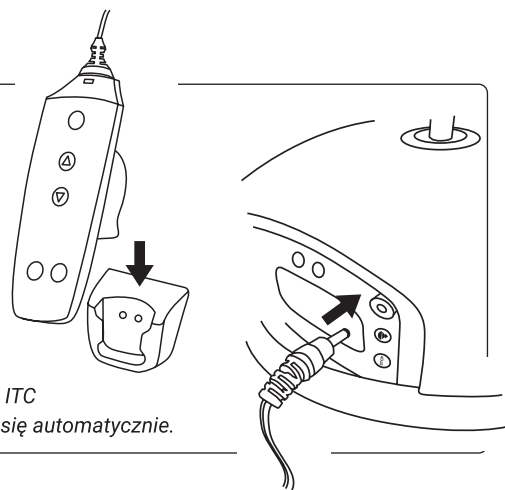

#### Awaryjne opuszczanie

Jeśli elektryczne opuszczanie awaryjne nie działa:

Użyj ręcznego opuszczania awaryjnego, wykonując następujące kroki:

- Wyciągnij klucz awaryjny znajdujący się z boku LUNA<sup>®</sup> X5.
- Włóż klucz ręcznego opuszczania do otworu.
- Przekręć klucz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby opuścić ręcznie.

