

F 12 03

MEDI REPOS



Instrukcja obsługi

Ważne informacje

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję.

Data: 02-01-2018

Wersja: 1

SPIS TREŚCI

1	CEL I BEZPIECZEŃSTWO	4
1.1	Cel	4
1.2	Instrukcja bezpieczeństwa	4
1.3	Przed przystąpieniem do użytkowania	5
1.4	Pojęcia	5
2	OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE FOTEŁA MEDI REPOS	6
3	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	9
3.1	Porady dotyczące utrzymania powłok z PVC	9
3.2	Przechowywanie	11
4	DANE TECHNICZNE I WYMIARY	11

1 CEL I BEZPIECZEŃSTWO

1.1 Cel

Fotel wypoczynkowy Medi Repos zapewnia komfortowy wypoczynek zarówno dla pacjenta jak i innych osób sprawujących opiekę nad pacjentem.

Wykonany jest z litego drewna bukowego, barwionego i lakierowanego w celu ochrony drewna i ułatwienia utrzymania.

Wybór kolorów zgodnie z paletą kolorów w karcie katalogowej.

Siedzenie, oparcie pleców oraz podnózek wykonany z powłoki PVC.

Wybór kolorów zgodnie z arkuszem palety kolorów w karcie katalogowej.

1.2 Instrukcja bezpieczeństwa



Ważne - ostrzeżenie!

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy przeczytać instrukcję obsługi i instrukcję bezpieczeństwa.


1.3 Przed przystąpieniem do użytkowania

Opiekun lub użytkownik zobowiązany jest sprawdzić następujące elementy przed przystąpieniem do użytkowania:

- Sprawdzić, czy opiekun otrzymał i przeczytał instrukcję obsługi urządzenia.
- Sprawdzić, czy fotel nie wymaga czyszczenia powierzchni PVC lub czy nie wymaga innych zabiegów nastawno-regulacyjnych umożliwiających prawidłowe użytkowanie fotela.
- W przypadku wątpliwości odnośnie użytkowania fotela Medi Repos proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy w celu otrzymania porady i wytycznych.

1.4 Pojęcia

Fotel Medi Repos

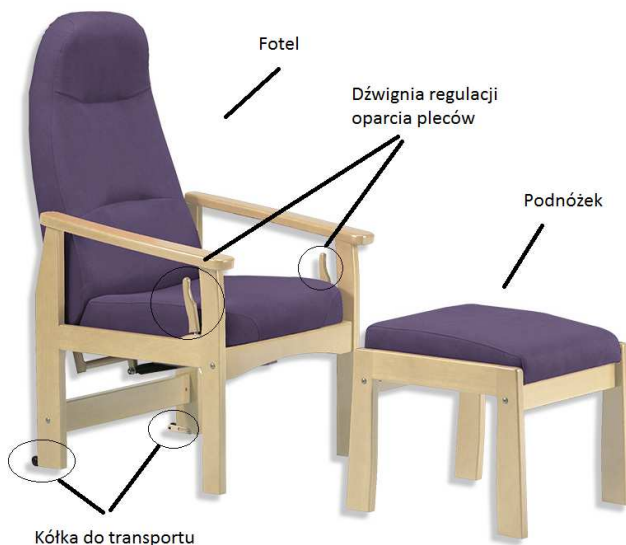

2 OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE FOTEŁA MEDI REPOS

Fotel MEDI REPOS posiada możliwość odchylenia oparcia pleców o 40° dzięki siłownikom pneumatycznym znajdującym się pod siedzeniem, połączonymi mechanizmem z oparciem pleców.



Do regulacji oparcia pleców służą dźwignie regulacyjne znajdujące się po obu stronach fotela na wysokości siedzenia.

W celu opuszczenia oparcia do pożądanej pozycji należy:

- zająć pozycję na fotelu,
- oprzeć wygodnie plecy na oparciu,
- pociągnąć jedną z dźwigni regulacji (lub obie jednocześnie) w kierunku „do siebie” i wybrać wygodną dla siebie pozycję do odpoczynku.

Uwaga: nie siadać gwałtownie na fotelu w pozycji rozłożonej, może to grozić przeważeniem użytkownika do tyłu.




W celu podniesienia oparcia do pożądanej pozycji należy odciążać oparcie pleców, odchylając się lekko do przodu, następnie pociągnąć jedną z dźwigni regulacji (lub obie jednocześnie) w kierunku „do siebie”.



Dla ułatwienia przemieszczania fotela, zamontowano dodatkowe kółka transportowe na tylnych nogach.

W celu zmiany miejsca fotela, należy złapać oburącz za podłokietniki i lekko unieść fotel tak, aby jego ciężar przeniósł się na nogi z zamontowanymi kołami. W tym momencie bez większych problemów fotel może zostać przetransportowany w żądane miejsce.

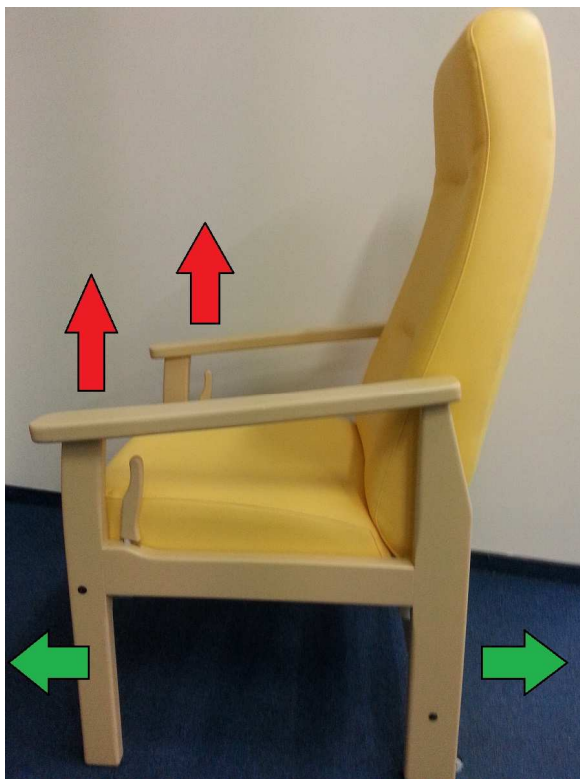

3 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

3.1 Porady dotyczące utrzymania powłok z PVC

Aby zapewnić zachowanie ich oryginalnego połysku i jasności, tkaniny powlekane muszą być systematycznie poddawane określonym czynnościom konserwacyjnym.

Zwykle usuwanie kurzu nie jest wystarczające.

Konserwacja bieżąca:

- Myć gąbką nawilżoną letnią wodą z mydłem
- Spłukać czystą wodą.

UWAGA

Nie należy wykonywać mycia i płukania dużą ilością wody, ponieważ mogłaby ona przenikać przez szwy.

Produkty, których NIE WOLNO używać:

- Alkohol czysty
- Aceton
- Czysty wybielacz
- Perchloroetylen i trichloroetylen
- Wszystkie rozpuszczalniki i detergenty
- Ścierne produkty do czyszczenia
- Wszystkie rodzaje wosków

Czyszczenie plam:

RODZAJE PLAM	PRODUKT DO UŻYCIA MAKSYMALNIE PO UPŁYWIE 5 godzin	SKUTECZNOŚĆ
Ołówek	Denaturat + chusteczka papierowa	Dobra
Czerwony długopis	Denaturat	Dobra
Flamaster czarny lub nieusuwalny	Denaturat	Dobra
Majonez, olej	Sucha szmatka + gąbka + letnia woda	Dobra
Ketchup	Letnia woda z mydłem marsylskim + miękka szczotka	Dobra
Musztarda	Sucha szmatka + gąbka + letnia woda	Dobra
Coca cola, sok owocowy	Letnia woda z mydłem marsylskim + chusteczka papierowa	Dobra
Czerwone wino	Rozcieńczony wybielacz + chusteczka papierowa	Dobra
Czarna kawa	Rozcieńczony wybielacz + chusteczka papierowa	Dobra
Pasta do butów	Letnia woda z mydłem marsylskim + miękka szczotka	Dobra
Szminka do ust	Letnia woda z mydłem marsylskim + chusteczka papierowa	Dobra
Krew	Letnia woda z mydłem marsylskim + chusteczka papierowa	Dobra
Alkohol w stężeniu 70°	Letnia woda z mydłem marsylskim + chusteczka papierowa	Dobra
Eozyna	Rozcieńczony wybielacz + chusteczka papierowa	Dobra
Betadyna	Rozcieńczony wybielacz + chusteczka papierowa	Średnie

3.2 Przechowywanie

Fotel Medi Repos należy przechowywać w suchych warunkach, w których wilgotność względna wynosi poniżej 70%.

4 DANE TECHNICZNE I WYMIARY

Specyfikacja techniczna

Maksymalna waga pacjenta:	135 kg
Wymiary fotela:	69x117x74 [cm]
Wymiary podnóżka :	48x45x51 [cm]

Pozostałe dane techniczne fotela MEDI REPOS z podnóżkiem

NAZWA PRODUKTU	SIEDZISKO			OPARCIE PLECÓW	PODŁOKIETNIKI		SZEROKOŚĆ		
	Ogólnie (szerokość pomiędzy podłokietnikami)	Głębokość	Wysokość siedziska od podłogi	Grubość Poduszki	Wysokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Głębokość
FOTEL DREWNIANY									
MEDI REPOS	52	48	46	10	73	66/59	69	117	74
PODNOŻEK	43	47	45	10	-	-	48	45	51

Producent:

MÉDICATLANTIC Groupe Winncare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - Francja
Tel: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail: info@medicatlantic.com
www.winncare.fr

W trosce o nieustanne podwyższanie jakości swoich produktów, grupa WINNCARE zastrzega sobie prawo do modyfikacji ich parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wyrob medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/CEE. Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach.

Sprzedaż w Polsce:

Winncare Polska Sp. z o. o

TEL: +48 68 371 10 45

E-mail: sales@winncare.pl

www.winncare.pl