

Pojedynczy materac MORFÉA - instrukcja

ZALECENIE ASKLÉSANTÉ:

Pierwszym krokiem w profilaktyce odleżyn u siedzącego lub leżącego pacjenta jest zmiana punktów podparcia ciała na materacu średnio co 2 do 3 godzin, aby ograniczyć zbyt długie ściskanie naczyń przez wystające elementy kostne i umożliwić ukrwienie tkanek.

Poziom zagrożenia: zerowy do niewielkiego

Maksymalny ciężar: 120 kg

Pozycjonowanie:

Właściwości: Odlewana pianka poliuretanowa wysokoelastyczna HR

Podpórka pod plecy: 45 °

Wymiary: 1980 × 893 × 145 mm

Gęstość: 35 kg/m³

Gwarancja: 5 lat*

WSKAZANIA:

Komfort leżenia. Pacjent samodzielnie zmienia położenie, ryzyko powstania odleżyn jest zerowe do niewielkiego.

Pacjent nie pozostaje w pozycji leżącej przez cały czas.

PRZECIWWSKAZANIA:

Pacjent pozostaje w pozycji leżącej przez ponad 10 godzin i ma trudności z samodzielną zmianą położenia. Powstanie odleżyn(-y) w miejscu ucisku.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYCIA:

Użycie dla wielu pacjentów pod warunkiem kontroli wzrokowej wyglądu pokrowca między poszczególnymi pacjentami.

Używanie produktów zawierających chlor (≤ 1000 ppm w przypadku codziennego użycia – roztwór wybielacza ≤ 5000 ppm pod pewnymi warunkami). Zapadnięcia na powierzchni pokrowca wskazują na konieczność wymiany.

INSTALACJA:

- Otworzyć pokrowiec, pociągając jeden z trzech suwaków zamka umieszczonego z trzech stron.
- Rozłożyć pokrowiec na łóżku, pilnując, aby duża etykieta znajdowała się na spodzie.
- Położyć materac, najszersza część powinna pozostawać w kontakcie ze stelażem łóżka.
- Zamknąć pokrowiec, zakładka zakrywa zamek.

CZYSZCZENIE/DEZYNFEKCJA

- VHMB14: Pokrowiec PVC – Bez ftalanów - Gwarancja prawna: 2 lata
- VH1PH/MPC: Pokrowiec PUHD Gwarancja prawna: 2 lata
- VH1P2/MPC: Pokrowiec PU - Gwarancja prawna: 2 lata

Wyrób zabezpieczony substancją biobójczą bez zagrożenia dla użytkownika. www.winncare.fr

GWARANCJA:

Gwarancja obejmuje wszystkie skutki usterek lub ukrytych wad wynikających z projektu, budowy lub użytego materiału, niemożliwych do wykrycia, które mogą powodować bezpośrednie lub pośrednie szkody.

Gwarancja nie obejmuje zmian materiału lub konstrukcji wynikających z użytkowania materaca, jego utrzymania lub przechowywania niezgodnego z zaleceniami ASKLÉSANTÉ.

Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać do usługodawcy, przekazując mu dany wyrób.

wraz z ważnym zaświadczeniem o gwarancji (z pieczętką i datą zakupu) oraz numerem partii.

Średni okres gwarancji wynosi 2 lata.